




20.05.2020	מתאריך:	קורפולס SLIM
עמוד מס' 1	מתוך 1 עמודים	מסמך דגשים

## מכשיר Corpuls3-Slim

מכשיר הקורפולס Slim הנו מכשיר Corpuls 3 הכולל יחידת דפיברילציה בגרסה חדשה. מכשיר זה נועד לעבודה עם אלקטרודות דפיברילציה **וללא כפות – Hands Free**, אין הבדל בפונקציונאליות של שתי היחידות.


### עיקרי ההבדלים בין שני המכשירים:

#### 1. חיבור יחידת הדפיברילציה ליחידת המוניטור (ראה איור):

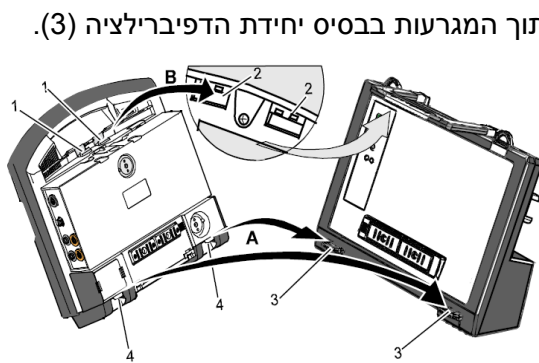

- א. מקם את הבליטות בבסיס יחידת המסך (4) בתוך המגרעות בבסיס יחידת הדפיברילציה (3).
- ב. קפל את ידית האחיזה של יחידת הדפיברילציה וחבר אותה לתפסי המאחז של יחידת המוניטור (1).
- ג. אין שינוי בקיבוע וטעינת המכשיר לאביזר טעינה ברכב ואו ל 220V, וכן אין שינוי בממשק הממוחשב של המכשיר במהלך הטיפול בשוק חשמלי או בקיצוב.

#### 2. חיבור אלקטרודה:

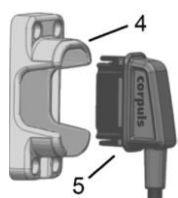

- א. בגב יחידת הדפיברילציה קיים שקע לחיבור אלקטרודת דפיברילציה (4).
- ב. בגרסה זו מומלץ להשתמש עם אלקטרודות דפיברילציה / קיצוב המחוברות מראש למכשיר. אלקטרודות אלו כוללות חלק כבל ומחבר היוצאים ממארז ההגנה של האלקטרודה.



#### 3. תיק אביזרים ליח' דפיברילציה:

- א. דגם זה כולל נרתיק לאביזרים המאפשר אחסון אלק' קיצוב, נגד חשמלי (test load) ופריטים נוספים.

#### 4. בדיקה בתחילת משמרת למכשירי קורפולס Slim:

- כל מכשיר מצויד ביחידה אלקטרונית – נגד חשמלי (testload) לצורך בדיקה בתחילת משמרת.
- בעת בדיקת שוק בתחילת משמרת/פעילות יש לנתק את האלקטרודה משקע האלקטרודה בגב המכשיר ולחבר את הנגד, לצורך ביצוע טעינת אנרגיה ופריקת אנרגיה על הנגד החשמלי.
- הבדיקה תבצע ברמת אנרגיה שלא תפחת מ- 50J



אין להחליף מודולים בין מכשירי קורפולס עם יחידת דפיברילציה רגילה לאלו עם יחידת דפיברילציה צרה.